
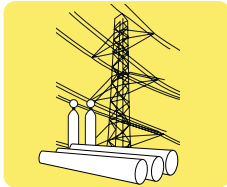


Notfallanweisung

Das SAM 360P gibt nur dann einen Schock ab, wenn es tatsächlich notwendig ist, und fügt einer Person **KEINEN** Schaden zu.

Schalten Sie das SAM 360P ein  und befolgen Sie die Sprachanweisungen.



1. Gefahr entfernen

Entfernen Sie jegliche Gefahrenquelle oder bringen Sie den Patienten aus dem Gefahrenbereich. Achten Sie dabei auf Ihre eigene Sicherheit.



Vorsicht: Das SAM 360P darf nur im Abstand von mindestens 2 m zu anderen Hochfrequenzgeräten betrieben werden. Alternativ kann das Gerät, das elektromagnetische Störungen verursacht, ausgeschaltet werden.



2. Reaktion überprüfen

Rütteln Sie den Patienten an den Schultern. Sprechen Sie den Patienten laut an.



3. Atemwege überprüfen

Kontrollieren Sie die Atmung. Machen Sie ggf. die Atemwege frei: Kopf überstrecken und Kinn anheben.

Fortsetzung umseitig

4. Hilfe rufen


Alarmieren Sie den Rettungsdienst. Bitten Sie umstehende Personen um Hilfe. Beschaffen Sie das SAM 360P.

Sie brauchen das SAM 360P nicht aus seiner Tragetasche auszupacken, um es zu verwenden.



5. HLW durchführen

Drücken Sie kräftig und schnell mit einer Frequenz von mindestens 100 Stößen pro Minute 5 bis 6 cm tief den Brustkorb des Patienten ein. 30 Kompressionen, gefolgt von 2 Beatmungen.

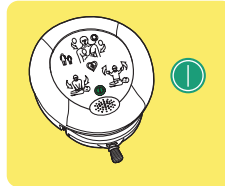

6. SAM 360P einschalten

Schalten Sie das SAM 360P ein.

Je nachdem, welches Pad-Pak zurzeit eingesetzt ist, hören Sie die Sprachanweisung „Erwachsener Patient“ oder „Kind“. Setzen Sie ggf. den richtigen Pad-Pak-Typ ein.




Warnung: Falls kein Pediatric-Pak für Kinder oder kein alternativer geeigneter Defibrillator zur Verfügung steht, können Sie zur Behandlung eines Kindes auch ein Pad-Pak für Erwachsene verwenden.



7. Oberkörper freimachen

Entfernen Sie die Kleidung im Brustbereich des Patienten. Entfernen Sie jegliches Metall (Büstenhalter und Schmuck) im Brustbereich. Vergewissern Sie sich, dass der Brustbereich des Patienten trocken ist. Wenn der Patient eine starke Brustbehaarung aufweist, rasieren Sie den Teil des Brustbereichs, wo die Elektroden aufgeklebt werden.

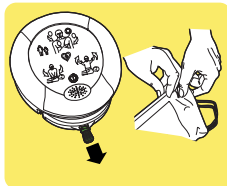

8. Elektrodenverpackung öffnen

Ziehen Sie an der grünen Lasche, um das Elektrodenfach zu öffnen, und reißen Sie die Schutzhülle der Elektroden auf.



9. Elektroden aufkleben

Folgen Sie den Sprachanweisungen. Lösen Sie die Schutzfolie von den Elektroden und kleben Sie die Elektroden, wie in der Abbildung dargestellt, auf den Oberkörper.



10. Den Patienten NICHT berühren

Stellen Sie sicher, dass der Patient während der Analyse oder Schockabgabe durch das SAM 360P von niemandem berührt wird.

Das SAM 360P gibt nur dann automatisch einen Schock ab, wenn es tatsächlich notwendig ist.

Mittels Sprachanweisung wird Ihnen mitgeteilt, was Sie tun müssen.

Fortsetzung umseitig

11. Fortfahren

Folgen Sie weiterhin den Sprachanweisungen. Das SAM 360P teilt Ihnen mit, wenn Sie ggf. die HLW fortsetzen müssen.

Das Metronom unterstützt Sie dabei, den richtigen Rhythmus für die HLW-Maßnahmen einzuhalten. Das SAM 360P verabreicht bei Bedarf einen erneuten Schock, aber erst, nachdem Sie vorher gewarnt wurden.

Wenn der Patient zu sich kommt, lassen Sie die Elektroden angeschlossen und folgen Sie weiterhin den Sprachanweisungen, bis der Rettungsdienst eintrifft.



HeartSine®

Inventor. Innovator. Lifesaver.

Weltweiter Hauptsitz:

HeartSine Technologies Inc. / 121 Friends Lane / Suite 400 / Newtown, PA 18940 / USA

Tel: +(1) 215 860 8100 / Fax: (1) 215 860 8192

Hergestellt von:

HeartSine Technologies Ltd. / Canberra House / 203 Airport Road West / Belfast BT3 9ED / Nordirland, U.K.

Tel: +44 (0)28 9093 9400 / Fax: +44 (0)28 9093 9401

www.heartsine.com
support@heartsine.com

H037-019-201-0 Februar 2014 (German)

